

BODYFILL 60 iREJU

Сшитая гиалуроновая кислота | ГК 24 мг/мл



Высокоочищенный вискоэластичный филлер для тела iREJU BODY HA Filler — идеальное решение для восстановления объема и профессионального контурирования тела.

iREJU BODY HA Filler эффективно **восполняет объем** в таких зонах, как грудь, голени и ягодицы. Кроме того, он отлично справляется с коррекцией целлюлита и неровностей кожи, появившихся после процедур липосакции.

3D технология iREJU

Система консервативной сшивки

14-дневный процесс сшивки при низкой температуре медленно соединяет молекулы сшитой и свободной гиалуроновой кислоты. Это обеспечивает однородную текстуру с частицами размером 1-2 микрона и сохраняет вискоэластичные свойства, способствующие лучшей интеграции с тканями.

Сертифицированное безопасное сырьё

Мы используем высокоочищенную гиалуроновую кислоту, безопасность которой полностью подтверждена по всему миру.

Система консервативной сшивки

Минимизирует различия между партиями продукции благодаря строгому контролю качества.

Гиалуроновая кислота в iREJU Body HA Filler

Отличается высочайшим уровнем очистки для максимальной безопасности, сводя к минимуму остатки сшивающего агента, эндотоксинов и белков

Преимущества

- Сшитая ГК в iREJU BODY HA Filler обеспечивает более длительный эффект филлера;
- Филлер содержит высокоочищенную стабилизированную гиалуроновую кислоту;
- Обладает высокой вязкостью, предотвращающей деформацию;
- Разглаживает кожу и борется с целлюлитом;
- Подходит для пациентов, которые не планируют хирургическое вмешательство, но хотят увеличить объем в таких зонах, как грудь и ягодицы;
- Гель на основе гиалуроновой кислоты не содержит компонентов животного происхождения, что снижает риск аллергических реакций;
- Общая анестезия не требуется;
- Процедура не требует разрезов и шрамов;
- Быстрый восстановительный период (по сравнению с пластической хирургией).

Показания к применению

- Асимметрия груди и ягодиц;
- Неровности кожи, включая целлюлит;
- Потеря объема в области груди и ягодиц;
- Контурная коррекция гениталий (женская/мужская интимная контурная пластика);
- Потеря подкожной ткани после липосакции;
- Воронкообразная грудная клетка;
- Асимметрия голеней;
- Дефекты мягких тканей, связанные с операциями и травмами.

Уникальная технология



Двухфазный

Монофазный

Гибридный моно- и двухфазный

- Высокая эластичность
- Высокое качество
- Безопасность
- Естественный объем

Характеристики

Экспериментальная группа показала лучшие физические свойства по сравнению с контрольной группой:

- Высокое содержание сшитого геля ГК по сравнению с аналогичными продуктами
- Высокая вискоэластичность сшитого геля ГК, подходящая для филлеров для тела

Образцы	Содержание ГК (мг/мл)	G': Модуль упругости	η : Комплексная вязкость	G'': Модуль потерь	Tan Delta (G''/G')	Сила введения (Н)
iREJU	24	470.6	430.0	92.8	0.20	9.14
Control A	20	395.4	505.5	43.7	0.11	12.42
Control B	20	212.4	435.3	41.1	0.19	11.34
Control C	20	163.8	205.6	28.2	0.17	10.34

ДО



ПОСЛЕ



ДО



ПОСЛЕ



Внимание

Большинство наших продуктов предназначено для профессионального использования врачами и специалистами. Приобретая данный продукт, вы соглашаетесь предоставить по запросу подтверждение медицинского или профессионального обучения. Указанные продукты не предназначены для личного или домашнего использования. Обратите внимание, что у данного продукта имеются противопоказания. Рекомендуется, чтобы все медицинские специалисты ознакомились с этими противопоказаниями и мерами предосторожности, внимательно изучив предоставленные инструкции.



sbodyline.com



Восстанавливает
объем груди без
хирургического
вмешательства



Увеличивает
объем ягодиц с
использованием
минимально
инвазивного
метода



Филлер для контурирования тела
“iREJU BODYFILL 60”



DFKBIOLAB INC.

ADDRESS. #522, 272 Sunhwagang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12106, Republic of Korea

TEL. +82-2-6225-7988 (7985,7984) **E-mail.** dfkbiolab@sbodyline.com **HOME PAGE.** www.sbodyline.com