

SARDENYATM

Luminous



Skinbooster
con
Aminoácidos



📍 #522, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12106, Republic of Korea

☎ +82 2 6255 7988

🌐 www.sbodyline.com ✉ dfkbio@dfkbio.com

SARDENYA™ Luminous

Skinbooster con AH y aminoácidos proporciona resultados naturales y duraderos.



Ácido hialurónico

El ácido hialurónico es un potente humectante que atrae y retiene la humedad en la piel, manteniéndola profundamente hidratada, tersa y suave. Mejora la elasticidad de la piel, reduce las líneas de expresión, fortalece la barrera cutánea y aporta una luminosidad fresca y saludable.


Aminoácidos

Los aminoácidos son los componentes básicos del colágeno y la elastina, que mantienen la piel firme, tersa y elástica. Ayudan a reparar los daños, fortalecen la barrera cutánea, mejoran la hidratación al atraer y retener agua, y protegen contra el daño de los radicales libres, dejando la piel más sana, tersa y resistente.

Información del producto


Unidad de embalaje	2.5 mL/1 jeringa
Ingredientes	Ácido hialurónico (AH) Aminoácidos Lidocaína
Almacenamiento	1-30° C 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Finalidad de uso	Se utiliza para la mejora temporal de las arrugas faciales en adultos mediante reparación física mediante inyección subcutánea de aminoácidos y ácido hialurónico.

Modo de acción

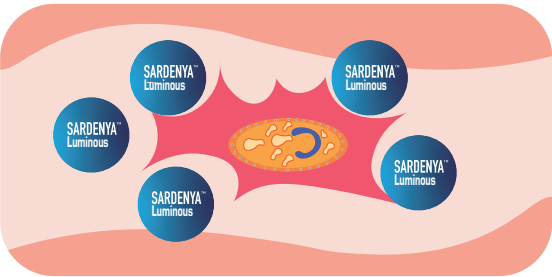


Acción 1: Extracelular

SARDENYA Luminous entra en la matriz extracelular con el fibroblasto colapsado y se incorpora a su estructura, lo que conduce a la restauración y recuperación de la actividad de los fibroblastos.

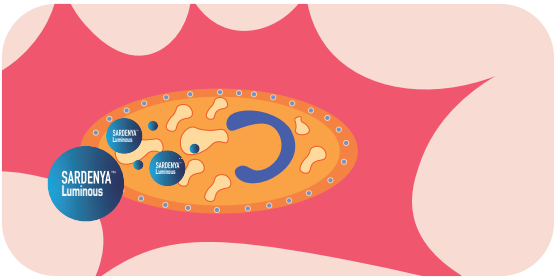

Acción 2: Intracelular

Biodegradación de HA a microesferas, seguida de pinocitosis e hidratación celular, lo que conduce al rejuvenecimiento de la homeostasis intercelular y a la recuperación de la actividad de los fibroblastos.

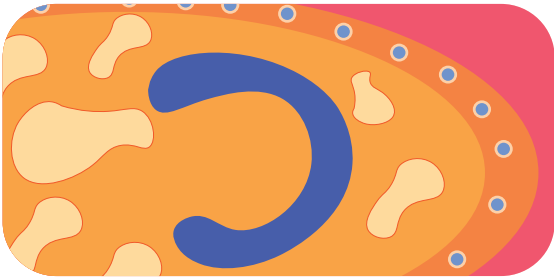


Acción 3: Subcelular

El proceso implica la biodegradación de HA a monosacáridos, la activación del ciclo del ácido cítrico, la síntesis de ATP y la recuperación de la actividad de los fibroblastos.


Combinación de AH y aminoácidos

Se ha comprobado científicamente que el ácido hialurónico ayuda a la piel a mantener y absorber la humedad. Se observó una mejora significativa en la hidratación y el tono de la piel en 2-8 semanas, y el aumento del grosor epidérmico fue significativo después de 12 semanas.

Dado que el ácido hialurónico presente en Skinbooster no suele estar reticulado, proporciona menos volumen y relleno que los rellenos dérmicos, pero proporciona mayor hidratación a la piel y rellena las líneas de expresión. Combinado con aminoácidos que mejoran el entorno dérmico, el ácido hialurónico puede potenciar el efecto de estos últimos y promover la cicatrización de heridas, lo que uniformiza la textura de la piel y produce resultados aún mejores.

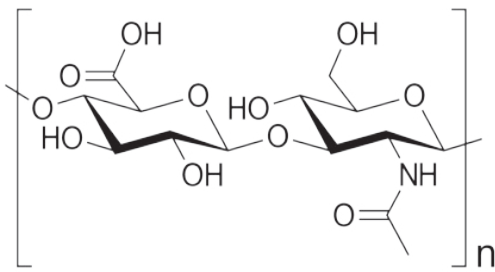

Estructura molecular del AH

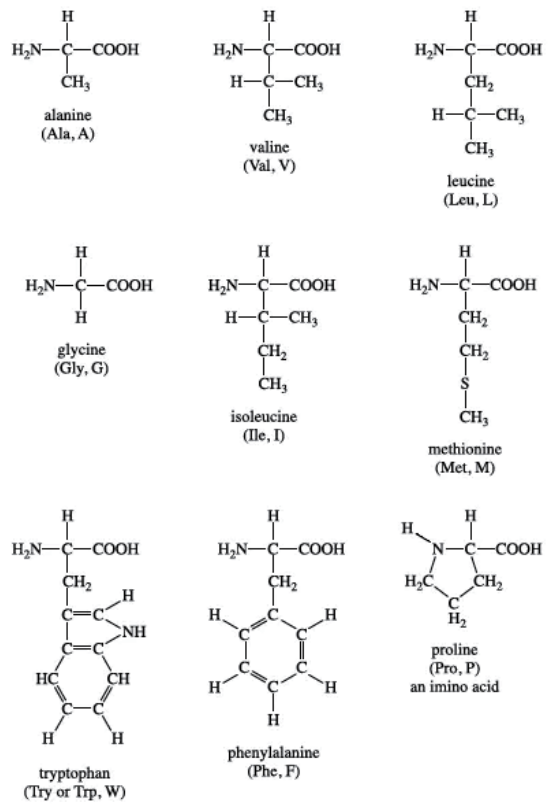

Aminoácidos

Referencias:

1. Yi, K. H., Winayanuwattikun, W., Kim, S. Y., Wan, J., Vachatimanont, V., Putri, A. I., Hidajat, I. J., Yogya, Y., y Pamela, R. (2024). Potenciadores de la piel: Definiciones y diversas clasificaciones. Investigación y tecnología de la piel: revista oficial de la Sociedad Internacional de Bioingeniería y la Piel (ISBS) [y] la Sociedad Internacional de Imagenología Digital de la Piel (ISDIS) [y] la Sociedad Internacional de Imagenología de la Piel (ISSI), 30(3), e13627. <https://doi.org/10.1111/srt.13627>

2. Yi K, Park M, Ree Y, Kim HM. Una revisión sobre "Estimulantes de la piel": Ácido hialurónico, ácido poli-L-láctico y ácido poli-D-láctico, polidesoxirribonucleótidos, polinucleótidos, factor de crecimiento y exosomas. Asociación Coreana de Dermatología Láser y Tricología 2023;4:1-5. <https://doi.org/10.46738/Aesthetics.2023.4.1.1>

Protocolos de uso

- Refinamiento de la matriz dérmica
- Volumen de precisión
- Lifting mínimamente invasivo
- Hidratación sostenida con efectos
- Mayor elasticidad de la piel

V-LIFT

Cánula 22G/25G

Técnica: Abanico

Profundidad:
Subdérmica

Duración: 3
tratamientos

Intervalo: 3-4
semanas

D-LIFT

Aguja 31G x 6 mm

Técnica: Abanico

Profundidad:
Subdérmica

Duración: 3
tratamientos

Intervalo: 3-4
semanas



Precauciones

1. No inyectar en los vasos sanguíneos.
2. No inyectar en los párpados.
3. En caso de reacción inflamatoria que persista durante más de una semana u otro efecto adverso, informe al médico y reciba tratamiento.
4. Los protocolos anteriores son solo orientativos y pueden variar según la condición o anatomía del paciente.