


SILKSENSE

Skinbooster de AH de alta concentración con PN. Lifting y rejuvenecimiento con la exclusiva técnica de inyección de 7 puntos.






HA de bajo peso molecular, HA de alto peso molecular

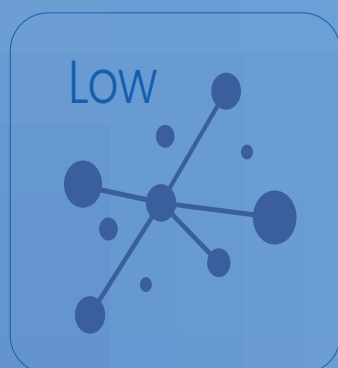

“ El ácido hialurónico de bajo peso molecular retiene la humedad e hidrata la piel. ”

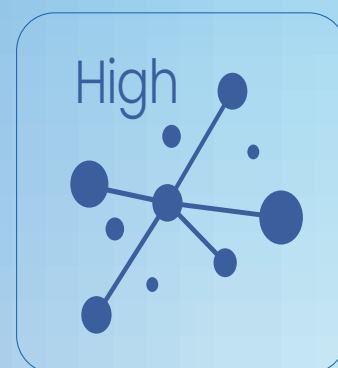

“ El ácido hialurónico de alto peso molecular aumenta gradualmente el volumen de la piel en la dermis, manteniendo el efecto lifting. ”

Polinucleótido

Un polinucleótido se refiere a una sustancia biocompatible derivada del ADN que promueve la regeneración tisular y estimula la producción de colágeno y elastina.

¿Qué lo hace único?

- Altamente seguro para el cuerpo humano, ya que no contiene agentes reticulantes que intervienen en la unión química.
- Al combinar ácidos hialurónicos de bajo y alto peso molecular, hidrata la piel y proporciona efectos duraderos.
- Realza el contorno facial gracias a las propiedades de la PN, que estimulan la producción de colágeno y forman gel.
- El AH, un componente clave de la matriz extracelular (MEC), ayuda a crear un entorno óptimo para la regeneración de la piel.

Información del producto

Nombre del producto	SILKSENSE
Unidad de embalaje	2.5mL/1 jeringa
Almacenamiento/Vida útil	1-30°C/24 months from date of manufacture
Ingrediente principal	AH no reticulado 40 mg/ml AH de alto peso molecular (1,7 Mda) 10 mg/ml AH de bajo peso molecular (0,3 Mda) 30 mg/ml Polinucleótido 2 mg/ml
Finalidad de uso	Mejora temporalmente los pliegues nasolabiales de moderados a severos en adultos mediante la reparación física del área mediante una inyección subdérmica de ácido hialurónico y polinucleótidos de sodio.

✦ **Cómo utilizar**

- Abra el envase del producto que contiene la jeringa.
- Retire con cuidado el tapón de la jeringa.
- Coloque una aguja de calibre 27 y 13 mm (el tamaño recomendado) en la jeringa antes de usarla.
- Desinfecte completamente la zona a tratar antes de la inyección.
- Inserte la aguja en la zona a tratar e inyecte lentamente una cantidad adecuada según la gravedad de las arrugas.
- Después del tratamiento, masajee la zona para distribuir el producto suavemente.

✦ **Programa de tratamiento**

Se recomienda someterse a 3-5 sesiones de tratamiento, con un intervalo de 2 a 4 semanas entre ellas para obtener resultados óptimos.

* Tenga en cuenta que los intervalos entre tratamientos pueden variar según la condición de la piel de cada individuo y sus necesidades específicas.

Los resultados suelen observarse entre 2 y 4 semanas después del tratamiento.

Esta guía ofrece una descripción general de las técnicas de inyección y las consideraciones de administración, garantizando resultados óptimos y atendiendo las necesidades y sensibilidades específicas de cada paciente.

✦ **Guía de inyección de 7 puntos**



"Las recomendaciones de tratamiento anteriores son pautas generales y pueden variar según la condición del paciente."

SILKSENSE

DFKBIOLAB INC.

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

T +82 2 6225 7984 **E** dfkbio@dfkbio.com **W** www.sbodyline.com