


# SILKSENSE

高浓度透明质酸（HA），配合多核苷酸（PN）  
采用独特的七点注射技术，实现肌肤提升与焕肤效果






## 低分子量透明质酸，高分子量透明质酸

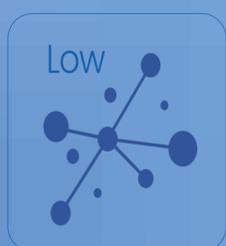

低分子量透明质酸  
能锁住水分  
并滋润肌肤

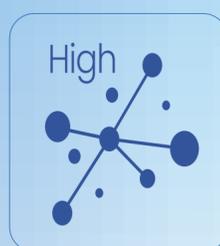

高分子量透明质酸  
在真皮层中逐渐为肌肤增加体积，  
并维持提拉效果

## 多核苷酸

指一种来源于 DNA 的生物相容性物质，能够促进组织再生，并刺激胶原蛋白和弹性蛋白的生成。

## 独特之处？

- 对人体高度安全，不含化学结合的交联剂
- 结合低分子量和高分子量透明质酸，既能为皮肤补水，又能带来持久效果
- 通过PN促胶原生成和提拉特性，改善面部轮廓
- 作为细胞外基质（ECM）关键成分的透明质酸，有助于为皮肤再生创造理想生长环境

## 产品说明

产品名	SILKSENSE
产品包装	2.5mL/1syr
储存/保质期	1-30°C / 自生产日期起24个月
主要成分	非交联透明质酸 40毫克/毫升 高分子量透明质酸 (1.7 Mda) 10毫克/毫升 低分子量透明质酸 (0.3 Mda) 30毫克/毫升 多核苷酸 2毫克/毫升
作用	改善成年人中重度鼻唇沟皱纹，通过皮下注射透明质酸和多聚核苷酸，起到修护改善皱纹的作用。

## 使用方法

- 打开含有注射器的产品包装
- 轻轻取下注射器盖子
- 在使用前，将推荐规格的27号针头（13毫米）连接到注射针管上
- 注射前彻底消毒治疗部位
- 将针头插入治疗部位，根据皱纹严重程度缓慢注射适量产品
- 治疗后，轻轻按摩注射部位以均匀分布产品

## 治疗时间

建议进行3-5次治疗，每次治疗间隔2-4周，以获得最佳效果

请注意，治疗间隔可能会根据个人皮肤状况和具体需求有所不同

通常在治疗后2-4周可观察到效果

本说明只是提供注射技术和使用注意事项的概述

确保最佳效果，同时满足每位患者的具体需求和敏感性

## 7点注射指南



"上述治疗建议为一般指导意见，具体方案可能根据患者的具体情况有所不同。"

# SILKSENSE

DFKBIOLAB INC.

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

**T** +82 2 6225 7984 **E** [dfkbio@dfkbio.com](mailto:dfkbio@dfkbio.com) **W** [www.sbodyline.com](http://www.sbodyline.com)