



SARDENYATM Matrix

高浓度双重高密度皮肤水光增强剂



What is SARDENYATM Matrix ?

独特的皮肤水光增强剂，采用纯透明质酸配方，能自然扩散到皮肤基底层。刺激胶原蛋白和弹性蛋白的产生，从内部增强皮肤的紧致度、水分和光泽。

“ 独特成分先进配方 ”

01 透明质酸钠

皮肤深层保湿，提升皮肤弹性

02 氯化钠

有助于维持皮肤的自然平衡，增强吸收

03 磷酸钠缓冲液

稳定肌肤，实现最佳皮肤相容性

技术核心

高低分子透明质酸渗透系统

采用科学平衡的配方，结合了40毫克高分子量的透明质酸钠。
40毫克低分子量透明质酸钠，提供全面的水分和皮肤年轻化效果。

高分子量的透明质酸在皮肤表面形成一层保护层。
创建保湿防护膜，防止皮肤水分流失同时提供健康皮肤保护层。
相比之下，低分子量的透明质酸能更深入地渗透到真皮层中，从内部刺激水分。
支持胶原蛋白活性，并随着时间的推移提高皮肤弹性

为了确保最大的皮肤相容性和最佳效果，该配方采用氯化钠和磷酸钠缓冲体系进行稳定，以维持等渗性和酸碱平衡。
这些成分有助于增强吸收、减少刺激，并在整个治疗过程中保持透明质酸分子的完整性

这款双效透明质酸复合物既能立即补水，又可以长期紧致皮肤，
非常适合恢复年轻的肌肤质地，减少衰老迹象，并改善整体真皮健康。

40毫克的透明质酸
高分子量

H-HA

MIX

L-HA

40毫克的透明质酸
低分子量



如何使用

BAP (生物-医美定位点)

一种标准化注射方式，使用面部两侧各5个注射点
产品最大化扩散和皮肤最小化淤青

这五个点标识了面部解剖学上最敏感的5个区域，避开了大血管和神经分支。
这样既降低了风险，又最大化产品在颧骨及颧骨下区域的扩散效果。

01

注射深度

深层真皮层到浅皮皮下层

02

使用剂量

总剂量:每次**2.5**毫升
注射点:每侧**5**点 (总计**10**点)
每注射点容量:**0.25** 毫升

03

间隔时间

初始阶段



维护阶段



治疗效果和持续时间可能因患者个人情况而异。
本信息仅供参考

01 颧骨

颧骨的最高点
支持中面部丰满并提升脸颊轮廓

03 脸颊

有助于面部提升效果

05 下巴

解决脸部下巴部体积流失问题并增强皮肤紧致度

02 鼻侧

平滑鼻唇沟周围的细纹

04 下颌线

颌线角度
有助于减少下垂并改善下颌线清晰度

01
02
03
04
05



SARDENYATM Matrix

DFKBIOLAB INC.

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

T +82 2 6225 7984 E dfkbio@dfkbio.com W www.sbodyline.com