



SARDENYATM Matrix

Скинбустер с высокой концентрацией ГК двойного действия



Что такое **SARDENYATM Matrix** ?

Уникальный скинбустер с чистой гиалуроновой кислотой, которая равномерно распределяется под кожей. Активно стимулирует выработку коллагена и эластина, возвращая коже упругость, интенсивное увлажнение и естественное сияние изнутри.

“ Инновационная формула, на основе ключевых ингредиентов ”

01 Гиалуронат натрия

Обеспечивает глубокое увлажнение, улучшает упругость кожи

02 Хлорид натрия

Поддерживает естественный баланс кожи, улучшает впитываемость

03 Буфер фосфата натрия

Стабилизирует pH для оптимальной совместимости с кожей

ТЕХНОЛОГИЯ

Премиальная система доставки гиалуроновой кислоты

Научно сбалансированная формула, объединяющая 40 мг гиалуроната натрия с высокой молекулярной массой и 40 мг гиалуроната натрия с низкой молекулярной массой для комплексного увлажнения и омоложения кожи.

Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой образует защитный слой на поверхности кожи, создавая барьер, удерживающий влагу и предотвращающий трансэпидермальную потерю воды, обеспечивая при этом мгновенное разглаживание.

В то же время гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой проникает глубже в дермальные слои, стимулируя увлажнение изнутри, поддерживая активность коллагена и улучшая эластичность кожи со временем.

Для максимальной совместимости с кожей и оптимальной эффективности формула стабилизирована хлоридом натрия и буферной системой фосфатов натрия, которые поддерживают изотоничность и pH-баланс. Эти компоненты способствуют улучшению впитываемости, минимизируют раздражение и сохраняют целостность молекул гиалуроновой кислоты в процессе лечения.

Вместе этот комплекс гиалуроновой кислоты двойного действия обеспечивает как мгновенное увлажнение, так и долгосрочное укрепление кожи, что делает его идеальным для восстановления молодой текстуры кожи, уменьшения признаков старения и улучшения общего состояния дермы.

40мг Гиалуроновой Кислоты
Высокая молекулярная масса

H-HA

MIX

L-HA

40мг Гиалуроновой Кислоты
Низкая молекулярная масса



Способ применения

ВАР (Био-Эстетические точки)

Стандартизированный метод с использованием **5** точек инъекций с каждой стороны лица
Оптимальное распространение препарата и минимальные кровоподтёки

Эти 5 точек определяют пять анатомически восприимчивых зон лица, избегая крупных сосудов и ветвей нервов.

Такой подход минимизирует риски и обеспечивает максимальное распространение препарата в малярной и субмалярной областях.

01

**Глубина
Инъекции**

От глубокого дермального слоя до поверхностного подкожного слоя

02


**Дозировка за
процедуру**

Общая доза: 2.5 мл за процедуру
Точки инъекций:
5 точек с каждой стороны (всего 10 точек)
Объём на одну точку инъекции: 0.25 мл

03

**График
Инъекций**

Начальный этап

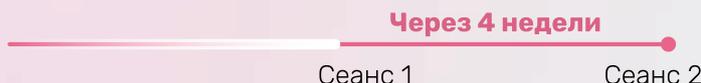

Поддерживающий этап



01 Скуловой выступ

Самая высокая точка скулы
Поддерживает объем средней части лица и подчёркивает контур скул

03 Трагус

Расположена перед ухом
Способствует эффекту лифтинга лица

05 Подбородок

Под уголком рта
Корректирует потерю объёма в нижней части лица и улучшает упругость кожи

02 Основание носа

Сбоку от носа
Разглаживает мелкие морщины в области носогубной складки

04 Угол нижней челюсти

Угол нижней челюсти
Помогает уменьшить провисание и улучшает контуры линии челюсти

01

02

03

04

05



SARDENYATM Matrix

DFKBIOLAB INC.

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

T +82 2 6225 7988 E dfkbio@dfkbio.com W www.sbodyline.com